

医療用品 3 手術用手袋及び指サック

歯科用手袋

# ラテックスグローブ フィットシールド グリーン (歯科用手袋)

再利用禁止

## 【禁忌・禁止】

- ・再使用することは絶対に禁止。
- ・天然ゴムで作られており、かゆみ、発赤、蕁麻疹を起こすことがあります。また、過去に血圧低下、呼吸困難、喘息様症状、むくみなどのアナフィラキシー様症状を起こしたことがある方は使用禁止。

## 【形状・構造等】

- ・左右兼用型非用指袋(パウダー無し)
- ・材質は天然ゴムを使用している。
- ・サイズは SS、S、M、Lの4種類ある。

## 【性能、使用目的、効能又は効果】

- ・歯科処置において、患者及び歯科医療従事者を交差感染から守るために使用する。

## 【使用方法】

- ・両手を流水にて洗浄し、よく乾燥させてから装着する。その後適量の消毒剤にてグローブ表面を消毒・乾燥して使用する。

## 【使用上の注意】

1. 使用注意
  - ・本品は歯科医療従事者が使用すること。
  - ・本品は指袋の使用目的以外で使用しないこと。
  - ・本品は薬剤によっては、膨脹したり、浸透したりする場合がありますので注意すること。
  - ・シリコン系印像剤の中で、このグローブは剥離すると硬く遅れるものがあるのに注意すること。
2. 重要な基本的注意
  - ・万一この包装が破損もしくは何らかの液漏れによって、本品に影響が生じたと思われる場合は使用を避けること。
  - ・まれではあるが上記で述べたアナフィラキシーショックを起こすことがある。
  - ・アレルギーではなく、手の不完全な洗浄・乾燥によりいろいろな歯科材料に含まれる化学成分が手指に残存して起こる皮膚炎も存在するので手を清潔に保つこと。

## 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

(貯蔵・保管方法)

- ・直射日光を避け、なるべく湿度の少ない涼しいところに保管すること。

## 【包装】

- ・1箱100枚入り

## 【サイズ】

- ・4種類 = SS、S、M、L

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売元: 有限会社中野デンタルサプライ

連絡先 : 〒299-1132  
千葉県君津市中富947-1  
電話 0439-54-2186  
Fax 0439-54-2181

製造元 : Sri Trang Gloves (Thailand) Public  
Company Limited (スリートラン グローブズ パブリック  
カンパニー リミテッド) (国名: タイ)