

医療用品 3 手術用手袋及び指サック

一般医療機器 非天然ゴム製 歯科用手袋 70911000

# フィットアンドタフ (ラベンダー) (未滅菌)

## 再利用禁止

### 【禁忌・禁止】

- 再使用することは絶対禁止

### 貯蔵・保管方法及び使用期間等

(貯蔵・保管方法)

- 直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しいところに保管すること。

(使用期限)

- 製造年月日より3年間(自己確認による)。

### 【形状・構造等】

- 左右兼用型非滅菌用手袋(パウダーなし)
- 材質は合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム)を使用している。
- 表面を粗造り仕上げしている。
- 表面の色がラベンダー色である。

### 【性能、使用目的、効能又は効果】

- 歯科処置において、患者及び歯科医師等を交差感染から守るために使用する。

### 【品目仕様等】

- |       |        |         |
|-------|--------|---------|
| 促進老化前 | 引っ張り強さ | 14MPa以上 |
|       | 伸び率    | 500%以上  |
| 促進老化後 | 引っ張り強さ | 14MPa以上 |
|       | 伸び率    | 400%以上  |

### 【操作方法又は使用方法等】

- 手袋取り出し口を開けて、手袋を取り出し装着する。
- 両手を流水で洗浄し、よく乾燥させてから装着する。
- その後適当な消毒剤にてグローブ表面を消毒して使用する。

### 【使用上の注意】

- 使用注意
  - 製品に含まれる化学物質により、アレルギー性接触皮膚炎の症状がでる恐れがある。また、体質によってはかゆみ、かられ、発疹等をおこすことがある。このような症状が発生した場合は、直ちに使用を中止し医師に相談すること。
  - アレルギーではなく手の不完全な洗浄・乾燥によりいろいろな菌を手に残す可能性がある。手指に残る化学物質も残存して起こる皮膚炎も存在するので手を清潔に保つこと。
  - 本品は指環の使用目的以外に使用しないこと。
- 重要な基本的注意
  - 万一この包装が破損もしくは何らかの理由で、本品に影響が生じたと思われる場合やピンホールなどの異常が認められる場合は使用を避けること。
  - 使用後は感染防止に留意し、医療用廃棄物として適切に処理すること。
  - 鋭利な器具に触れると破れ、穴があくことがあるので注意すること。

### 【包装】

- 1箱200枚入り

### 【サイズ】

- 4種類 = SS、S、M、L

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売元: 有限会社中野デンタルサプライ

連絡先: 〒299-1132

千葉県君津市中富947-1

電話 0439-54-2186

Fax 0439-54-2181

製造元: Sri Trang Gloves (Thailand), Public  
Company Limited (スリートラン グローブズ タイラ  
ンドパブリックカンパニー リミテッド)  
(国名: タイ)