




# 顔に触れない フェイスシールド

価格 2,300円(税別)


フレーム・日本製くもり止めシールドセット(レギュラーサイズ)

## シールドの装着方法


※ご着用の際はフレームの上下、及びシールドのR(右)・L(左)マークの向きが正しいかご確認ください。

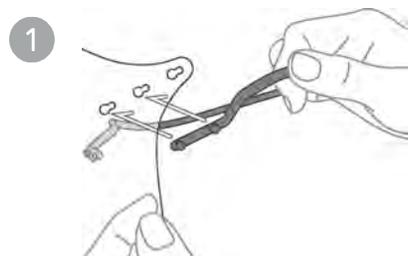

1 シールドの取付穴にフレームの突起を差し込んでください。

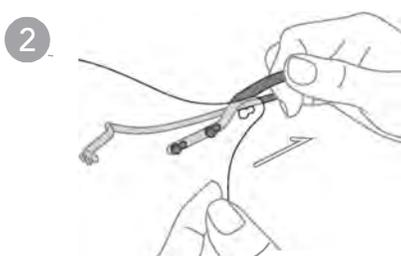


2 矢印の方向へフレームを引っ張ります。

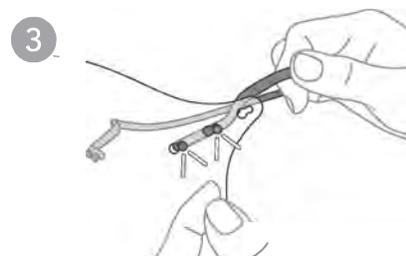


3 パチッとなればOKです!

## 付属クッションシールの取付

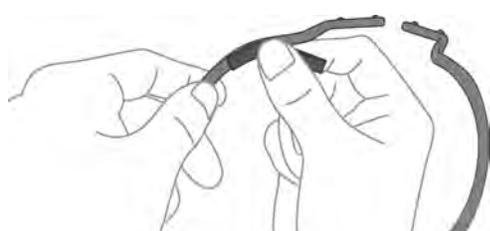

付属のクッションシールをご使用の際は、フレームの内側、右図の位置に貼り付けてご使用ください。

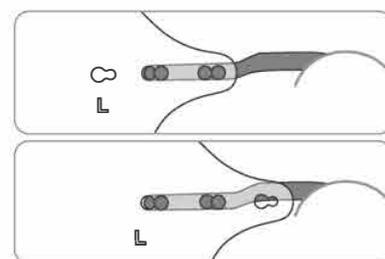

取付穴の位置をずらすことで、フェイスシールドと顔の距離を調整できます。(2段階)

## ⚠️ご使用上の注意 ⚠️

- ・フェスシールドは感染予防を約束するものではありません。
- ・保管の際は直射日光、高温多湿にご注意ください。
- ・繰り返しご使用される際は銀イオン水や中性食器用洗剤で洗浄してご使用ください。※一部のアルコール消毒液のご使用はシールドを白濁させる原因となります。
- ・衛生面、機能面から約2週間～1ヶ月でフェスシールドの交換を推奨いたします。
- ・曇り止め加工を施しておりますが、運転中の使用はお控えください。
- ・掛け外しの際は必ず両手で行って下さい。
- ・片手での無理な外し方は跳ね返りの危険や、変形、破損に繋がります。
- ・使用推奨環境5～35℃で使用してください。使用推奨環境以外でご使用は、フレーム変形、破損の原因となりますのでご注意ください。
- ・必ずフレームにシールドを取り付けてから頭に装着してください。

内容物/シールド  
フレーム  
クッションシール

材質/シールド:PET  
フレーム:PC  
クッションシール:CR



**交換シールドは別売2枚1000円**

## お問い合わせ先

製造元:株式会社ボストンクラブ  
<http://www.bostonclub.co.jp>  
 Email: [info@bostonclub.co.jp](mailto:info@bostonclub.co.jp)

販売元: 有限会社中野デンタルサプライ  
 〒299-1132千葉県君津市中富9 4 7-1  
<http://www.nakano-ds.com>  
 Tel: 0439-54-2186  
 Email: [info@nakano-ds.com](mailto:info@nakano-ds.com)



ご用命は